

Masque barrière BARRAL EVO PK 40-2 réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1 selon la note d'information ministérielle du 29 mars 2020 et selon AFNOR SPEC S76-001:2020

Composition : Textile Evolon® EVO PK 40 double couche- Etoffe en micro-filaments composée de 70% PET et 30 % PA,
 Attaches : Polyester



Niveau de performance : Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de l'IFTH après 50 lavages (rapport 2020-04-07-026-1 du 19/05/2020)

- efficacité de filtration des particules de 3 µm > 99,9 %
- perméabilité à l'air pour une dépression de 100 Pa > 103,3 L.m⁻².s⁻¹



Domaine d'utilisation : Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (Masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (Masques filtrants de type FFP2). Le design de ce masque a été établi en suivant les recommandations de patronage de l'AFNOR SPEC S76-001 et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins.

Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des **usages non sanitaires**. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. Ce masque individuel est destiné à être proposé **aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leur activités** (hôtesses de caisses, agents des forces de l'ordre).

Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Les masques filtrants de type FFP2 et les masques à usage médical (ou chirurgicaux) ont vocation à être utilisés et réservés au personnel de santé. La durée de port, elle, sera inférieure et limitée à 4 heures sur une seule journée (équivalent à une demi-journée). Le masque permet de constituer une barrière de protection contre une éventuelle pénétration virale dans la zone bouche et nez de son utilisateur ou d'une personne se trouvant à proximité. Il a pour vocation de protéger cette zone contre tout contact avec les mains. Seule la protection limitée est revendiquée.

Il est préconisé de nettoyer le masque avant utilisation.

Le masque barrière est dimensionné de façon à correspondre à la morphologie moyenne de la population française.

AVERTISSEMENT L'utilisation de ce masque barrière s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement et des mesures d'organisation du travail. Ce masque barrière n'exonère absolument pas l'utilisateur de l'application des gestes barrières complétés par la mesure de distanciation sociale qui sont essentiels.

Contexte d'utilisation : Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

Mise en place : Pour être efficaces, les masques barrières doivent être correctement utilisés. Pour cela, il est recommandé de :

- 1) Se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydro-alcoolique avant de mettre un masque
- 2) Pour une réutilisation de masque, s'assurer que celui-ci ait bien été lavé au préalable
- 3) Repérer le haut du masque et placer le masque barrière sur le visage,
- 4) Tenir le masque barrière et passer les élastiques du jeu de brides derrière les oreilles, et abaisser le bas du masque barrière en vérifiant qu'il couvre bien le menton.
- 5) Une fois ajusté, ne plus toucher le masque barrière avec les mains. Chaque fois que le masque barrière est touché, le porteur doit se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydro-alcoolique

EXEMPLE



Retrait : Pour ne pas être contaminé lors du retrait d'un masque barrière, il est recommandé de :

- a) retirer le masque barrière en saisissant par l'arrière les élastiques du jeu de brides sans toucher la partie avant du masque barrière.
- b) Placer le masque dans un contenant spécifique (sac plastique) propre dans le cas où celui-ci est stocké afin d'être lavé ultérieurement.
- c) Se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydro-alcoolique. Nettoyer l'extérieur du sac avec un produit nettoyant.

Entretien : le masque barrière doit être lavé à 60°C minimum, pendant 30mn, avec un produit lessiviel classique. L'adoucissant n'est pas nécessaire. Il est recommandé de le placer dans un filet de protection pour le lavage en machine.

Il doit être séché à l'air libre, et peut être repassé à température modérée (position soie).



Repassage à basse
 température
 maximum: 110 °C